

器 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

## バイトチップ エコタイプ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

ミキシングチップ グリーンに装着する。

[形状]



[材質] ポリプロピレン

### 【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和する器具であり、注入機能を有する。  
ミキシングチップの先端に装着して使用する。

### 【使用方法等】

ミキシングチップの先端に押し込み装着する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

ミキシングチップがカートリッジに確実に装着されていること、  
またバイトチップがミキシングチップに確実に装着されている  
ことを確認してから、材料の押し出しを行うこと。

### 【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をし、破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (2) **【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (3) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (4) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社  
電話番号 06-6845-0066

製造業者： Delian Technology and Trading Beijing Co., Ltd.  
（国名：中華人民共和国）