

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDNコード 70908000

## ファイバーホイール

### 【形状・構造及び原理等】

形状：



タイプ	ファイン	ミディアム	コース
色	レッド	ブラック	ブラウン

材質：ナイロン繊維(作業部)、ステンレス鋼(軸部)

### 【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに装着し、補綴物等の研磨に用いる。

### \*【使用方法等】

- (1) 歯科用ハンドピースに装着する。この時、ハンドピースに確実に装着されていることを確認すること。
- (2) 作業部が正常に回転することを確認する。  
推奨回転数：5,000 -10,000rpm  
最大回転数：12,000rpm
- (3) 補綴物等に作業部を接触させて研磨する。

### 【使用上の注意】

- (1) 最大回転数を超えて使用しないこと。
- (2) 使用前に正常に回転していることを必ず確認すること。
- (3) 保護眼鏡を使用して、安全に使用すること。
- (4) 破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- (5) 磨耗等劣化した製品は使用しないこと。
- (6) 本品を改造しないこと。
- (7) 研磨時に異常な振動・音が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。
- (8) 歯科用ハンドピースの取扱い説明書に従って使用すること。
- (9) 過度な力を加えて使用しないこと。
- (10) 【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- (11) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (12) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分(水漏れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社  
06-6845-0066

製造業者：Strauss & Co. Industrial Diamonds Ltd.  
(国名：イスラエル)