

コントラスター

【禁忌・禁止】

本製品に使用されている成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

【形状】

コントラスター

N.4

N.5



N.7

N.8



オクルージョン

フレキシブルコントラスター



【材質】

商品名	原材料名
コントラスター N.4/N.5/N.7/N.8	アルミニウム
オクルージョン	アルミニウム
フレキシブルコントラスター	銅、シリコンコーティング

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査の過程で口腔内撮影を行う際に用いる器具である。本品全体が黒色の為、被写体の後ろに添えることで歯牙の形態・色調を鮮明に把握する事ができ、診療に有効である。

【使用方法等】

- (1) 使用前に滅菌する。
- (2) 口腔内に挿入し、撮影部位が写るように位置と角度を調節する。
- (3) 使用後は、付着した汚染物を速やかに取り除き、高圧蒸気滅菌を

行う。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に滅菌すること。
- (2) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (3) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (4) 破折等の原因となるため、過度の衝撃を与えたり、曲げ、切削、打刻、バーナー等による加熱等の加工を行わないこと。
- (5) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (7) 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等を除去し洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- (8) 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに清拭すること。
- (9) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 滅菌済みのものを保管する際は、汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (3) 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (4) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- (5) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後洗浄/消毒する際、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- (2) 機器に付着した血液、体液、組織等は、乾燥し、固化する前に流水洗浄すること。
- (3) 洗浄剤/消毒剤を使用する際は、防錆性の洗浄剤/消毒剤を使用し、使用する洗浄剤/消毒剤の取扱説明書の記載内容に従って洗浄/消毒すること。
- (4) 金属たわし、磨き粉等の使用は、表面に傷が生じ腐食の原因となるため避けること。
- (5)
- (6) 洗浄/消毒後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
- (7) 滅菌は高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。（121℃～135℃の温度で滅菌すること。）
- (8) 洗浄、消毒装置あるいは高圧蒸気滅菌装置を使用する際は、機器どうしを接触させないこと。
- (9) 乾燥させてから保管すること。
- (10) 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）は、136℃以上にしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Indusbello Ind. e Com. de Prod. Med. e Odont Ltda.
（国名：ブラジル）