


機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDNコード 35794000

ワックスレトリック

II

*【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

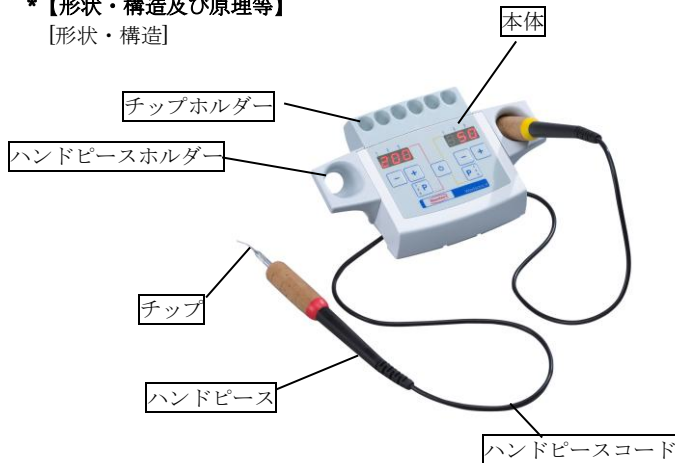

付属チップ
No.1

No.3



※別売で形状の違うチップがある。

電圧	100 - 240 V 50 - 60 Hz
出力	10 W
設定温度	50 - 200 °C
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	150 x 60 x 98 mm
重量	270g(本体のみ)、 460g(電源部品を含む)

【原理】

電気でチップ部を加熱するワックス形成器で、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために使用する。

【使用目的又は効果】

ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

【使用方法】

【準備段階】

- (1) メインスイッチを押して電源をオンにする。
- (2) 単位 °C/°F の切り替えをした後に、2 本のチップ温度を＋ボタンで設定する。
- (3) プログラム機能があるため、各ハンドピース毎に 3 つの温度をメモリー設定できる。

【使用段階】

- (1) ハンドピースに装着したチップをワックスブロック等に当て、ワックス溶解する。

※詳細については、別紙取扱い説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

- (1) 操作時以外は火災防止のためハンドピースは常に本体上部のホルダーに収納すること。
- (2) チップは設定により 200℃まで温度が上昇するのでワックス以外は触れぬようにすること。
- (3) ハンドピースコード、電源コードは極端に曲げたり、強く引っ張ったり、引っ掛けたりすると断線するので注意すること。
- (4) 本体に異常が発生した場合、すぐに使用を止めること。
- (5) チップは常に清潔な状態を保つこと。
- (6) チップの形状は加工しないこと。
- (7) 破折の原因となるため、チップを過度の圧力でワックスに押しつけないこと。
- (8) 細いチップは蓄熱性が低いため、過熱が弱い時には温度を上げること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本体は、柔らかい布等で拭くこと。溶剤を含む洗剤の使用や水洗いは避けること。
- (2) 使用後はチップに残ったワックスをよく拭きとること。ワックスが付着したままの場合、チップの加熱機能を損なう恐れがある。
- (3) 本製品は歯科医療従業者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (4) 本製品を適切に使用する限り 3 年間保証、但し自然に消耗する部品（磨耗部品）、および消耗品は保証から除外される。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Renfert GmbH
(国名：ドイツ)

取扱説明書を必ずご参照ください。