

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN コード 16189000

GEO ワックスワイヤー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】



- (3) 本材は一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- (4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Renfert GmbH
(国名：ドイツ)

【材質】

主成分：
パラフィンワックス、色素

【種類】

硬さ	色	サイズ
ハード	ターコイズ	2 mm
ハード	ターコイズ	2.5 mm
ハード	ターコイズ	3 mm
ハード	ターコイズ	3.5 mm
ハード	ターコイズ	4 mm
ハード	ターコイズ	5 mm
ミディアムハード	ブルー	2 mm
ミディアムハード	ブルー	2.5 mm
ミディアムハード	ブルー	3 mm
ミディアムハード	ブルー	3.5 mm
ミディアムハード	ブルー	4 mm
ミディアムハード	ブルー	5 mm

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックスである。

【使用方法等】

- (1) 症例にあわせて長さを調節し、ワックスパターンと固定する。
- (2) カービング、埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】

- (1) 本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- (2) 使用場所には、消火装置を備えること。
- (3) 他の製品と混用しないこと。
- (4) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。
- (6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、直射日光、火気を避けて室温保管すること。
- (2) 使用場所および保管場所には、消火装置を備えること。