

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN コード 32692000


エアフリップルーペ EL

【禁忌・禁止】

・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、光照射器、レーザー又はそれに準ずる光線及び点灯させたコードレスヘッドライトを直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

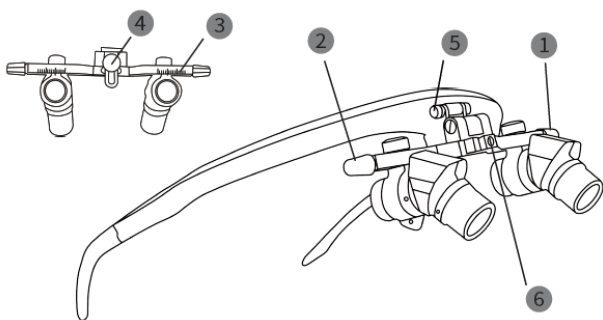

- ①②IPD（瞳孔間距離）調整ノブ
③IPD スケール
④高さ調整ノブ
⑤傾斜調整ジョイント部
⑥ヘッドライト接続部

種類	倍率	重さ	作動距離
EL3.0	3.0 倍	65g	450m～550mm
EL4.0	4.0 倍	65g	450m～550mm
EL5.0	5.0 倍	66g	450m～550mm
EL6.0	6.0 倍	66g	450m～550mm

【材質】

ルーペ部：光学レンズ
フレーム部：プラスチック

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着するレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。通常、双眼で用いられ、観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

- ヘッドストラップを本品のフレーム端部に取り付ける。
- ノーズパッドを上下に動かして高さを調整する。また、ノーズパッドの脚部をつまみ、角度を調整する。
- 高さ調整ノブを反時計回りに回して緩め、ルーペ部を上下に移動させる。対象物が視野中央に位置することを確認後、ノブを締めて固定する。
- 対象物を観察し、視野の上部または下部が暗くなる場合は、傾斜調整ジョイントを用いてルーペ部の角度を調整する。
- 対象物を観察し、左右の像が重ならない場合は、IPD 調整ノブを用いて、瞳孔間距離を調整する。
- 拡大像を観察する。

【使用上の注意】

- 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は、使用しないこと。
- フレームが肌に触れる箇所、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した場合は、本品の使用を止め、医師の診断を受けること。
- 部品を調整する際は、機械的損傷を防ぐため、過度な力を加えないこと。
- 本品は耐熱性ではないため、滅菌等で加熱しないこと。
- 本品は水洗いできないため、浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 衝撃を避けるため、付属の収納箱で保管すること。
- 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- レンズは、専用のレンズ洗浄液又は中性洗剤を含ませた柔らかい布で清掃し、清掃後は十分に乾燥させること。
- 頑固な汚れがある場合は、70%以下のアルコールを含ませた本品付属のクリーニングクロスで清掃すること。
- 水洗いおよび薬液浸漬を行わないこと。
- 接続箇所の緩みや破損・不具合がないか定期的に点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Foshan Yuyo Medical Instrument Co.,Ltd.
(国名：中華人民共和国)

取扱説明書を必ずご参照ください。