

エリート LC トレー

【禁忌・禁止】

本品又はメタクリル酸エステルに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】 板状
【主成分】 メタクリレート系化合物
【色】 ピンク、白、青

【使用目的又は効果】

ペースト状で常温で硬化させるレジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】

- (1) 模型にトレーの外径線を記入する。
- (2) 必要に応じて模型にパラフィンワックス等のスペーサーを圧接し、印象材スペースを確保する。
- (3) スペーサーを使用しない場合は、模型に分離材を塗布し、乾燥させる。
- (4) 本品を容器から出し、保護フィルムを剥がして、模型に圧接する。
- (5) 外径線に沿って余剰部分をカットする。
- (6) トレーに用いる場合は、余剰分でハンドルを形成し、接着させる。
- (7) ハロゲン又は紫外線光重合器に入れ、3～5分間硬化させる。
- (8) トレーを模型から外し、裏面も光重合器で3～5分間硬化させる。
- (9) ワックス残渣をお湯で洗い流す。
- (10) 研削、研磨仕上げを行う。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) 自然光によっても重合が進行するので、本品を容器から取り出した後は、直ちに容器の蓋を閉めること。
- (2) 硬化後のレジン表面に形成されるゼリー状の粘つきのある物質は、エタノールを含ませたティッシュで取り除くこと。

【使用上の注意】

【使用注意】(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 本品又はメタクリル酸エステルに対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴の有無を確認し、既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

【重要な基本的注意】

- (1) 本品又はメタクリル酸エステルに対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- (2) 本品が直接皮膚に触れないようにし、手袋を着用すること。
- (3) 本品が目に入らないように注意すること。目に入った時は、

- (4) 硬化物を研削、研磨する際は、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう注意すること。
- (5) 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (6) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (8) 廃棄の際は、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 高温、多湿、直射日光、火気を避けて、25℃以下で保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【有効期間】

包装に記載の使用期限までに使用すること。

(例：☞ 2013-10 は 2013年 10月を示す)

【記載の使用期限は自己認証(製造業者データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：ZHERMACK S.p.A.
(国名：イタリア)