

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード 70907000

ゼタサンド ガラスビーズ

【形状・構造及び原理等】

【主成分】 二酸化ケイ素、酸化ナトリウム、酸化カルシウム

【粒サイズ】 40-70、90-150、150-250 μm

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。

【使用方法等】

サンドブラスターに投入して使用する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

使用するサンドブラスターの説明書に従って使用すること。

【使用上の注意】

- (1) 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう注意すること。
- (2) 作業時には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等の防具を使用すること。
- (3) 本品が目に入らないように注意すること。目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- (4) 使用前に必ず製品の点検をし、破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (5) **【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (7) 廃棄の際は、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 吸湿性が高いため特に湿気に注意し、高温、多湿、直射日光、水分（水濡れ）を避けて保管すること。
- (2) 開封後は、密封して保管すること。
- (3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：ZHERMACK S.p.A.
(国名：イタリア)