

歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDN コード 70887000

硬化ジェル

**【形状・構造及び原理等】

【形 状】 ゲル状

【主成分】 炭化水素、アルコキシシラン、ジオクチルスズオキシド

【使用目的、効能又は効果】

印象採得に使用する材料である。
対応する縮合型シリコン系印象材料のキャタリストとして用いる。

【操作方法又は使用方法等】

対応するシリコン系印象材料の添付文書に従い、硬化ジェル又は硬化リキッドを印象材料と混合する。

「使用方法に関連する使用上の注意」
・ 使用後は容器の蓋をしっかりと閉めること。

【使用上の注意】

- ・ 本品が目に入らないように注意すること。目に入った時は、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ・ 本品が肌に付かないように注意すること。肌に付いた時は、直ちに流水で洗浄すること。
- ・ 手袋を使用すること。
- ・ 使用前に必ず製品の点検をし、破損等が確認された場合は使用しないこと。
- ・ 【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・ 高温、多湿、直射日光を避けて、5～27℃で保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【有効期間・使用期限】

- ・ 包装に記載の使用期限までに使用すること。
(例： 2021-10 は 2021 年 10 月を示す)
【記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による】

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：ゼルマック エスピーエー
ZHERMACK S.p.A.
(国名：イタリア)