

***2024年11月（第4版）

**2024年05月（第3版）

*2023年10月（第2版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000025

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

MEDIHEAL リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


1. プレーティング天竺

1-1 長袖シャツ



	M	L	LL	3L
身丈	69	71	74	77
身巾	108	114	122	130

1-2 ロングパンツ

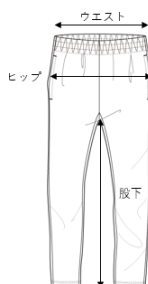


	M	L	LL	3L
ウエスト	72	80	88	96
ヒップ	106	111	117	124
股下	71	72	73	74

*1-3 半袖シャツ




	M	L	LL
身丈	69	71	74
身巾	108	114	122

*1-4 ハーフパンツ

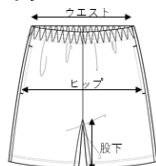


	M	L	LL
ウエスト	72	80	88
ヒップ	106	111	117
股下	19	20	21

***1-5 半袖シャツ（レディース）

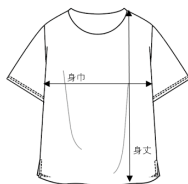

	M	L	LL
身丈	62.5	64.5	66.5
身巾	56	58	60

***1-6 ロングパンツ（レディース）

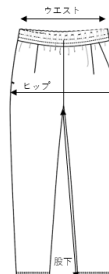

	M	L	LL
ウエスト	34	37	40
ヒップ	54	57	60
股下	68	69	70

2. 両面起毛

2-1 長袖クルー



	M	L	LL	3L
身丈	65	68	71	74
身巾	96	100	104	110

2-2 レギンス




	M	L	LL	3L
ウエスト	66	72	78	84
ヒップ	94	100	106	112
股下	74	76	78	80

2-3 スウェットトレーナー



	M	L	LL	3L
身丈	71	73	75	77
身巾	118	124	130	136

2-4 スウェットパンツ

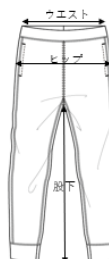

	M	L	LL	3L
ウエスト	74	78	83	88
ヒップ	104	110	116	122
股下	68	70	72	74


**2-5 長袖シャツ



	M	L	LL
身丈	66	68	70
身巾	57	60	63


ご使用前に必ずこの文書をお読みください

**2-6 ロングパンツ

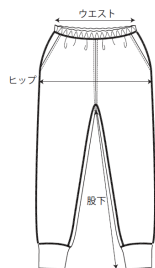

	M	L	LL
ウエスト	68	74	80
ヒップ	50	53	56
股下	70	70	70

**2-7 レギンス

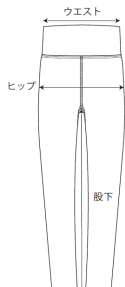

	M	L	LL
ウエスト	66	72	78
ヒップ	40	43	46
股下	68	68	68

*3. ベア天竺

*3-1 長袖クルー



	S	M	L	LL	3L
身丈	62	65	68	71	74
身巾	80	86	92	98	104

*3-2 レギンス



	M	L	LL	3L
ウエスト	66	72	78	84
ヒップ	82	88	94	100
股下	68	70	72	74

寸法（単位：cm／公差：±10%）

1. 原理

本品は原材標準織造に高純度セラミックを定着させ、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線の血行促進作用】

- 血行促進
- 疲労軽減
- 筋肉のバネ、コリの緩和
- 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認してください。
- 衣類として着用してください。
- 日常生活時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。

【使用上の注意】

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まりますので、十分な水分補給を行ってください。
- 着用前に洗濯することを、おすすめします。
- 体質などにより、着用時に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 濡れた状態での放置や湯置き洗いは、お避ください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- タンブラー乾燥は、お避ください。
- 素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除いてください。
- 素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

株式会社ワークマン

〒372-0824 群馬県伊勢崎市柴町 1732

電話：0270-32-6111

（受付時間：平日 10:00～17:00 土日祝 / 休業）