

医療用品04整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

Champion リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

1 半袖シャツ



	S	M	L	XL
身丈	66.5	69.5	72.5	75.5
身幅	56	58	60	62

2 ショートパンツ




	S	M	L	XL
ウエスト幅	37.5	39	40.5	42
渡り幅	33.6	34.8	36	37.2
股下	19	20.5	22	23.5

3 長袖シャツ



	S	M	L	XL
身丈	65	68	71	74
身幅	56	58	60	62

4 ロングパンツ

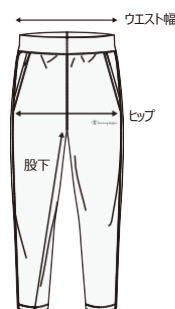

	S	M	L	XL
ウエスト幅	37.5	39	40.5	42
ヒップ	49	51	53	55
股下	68	70	72	74

寸法（単位：cm／公差：±10%）

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させ、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線の血行促進作用】

- 血行促進
- 疲労軽減
- 筋肉の疲労軽減
- 筋肉のハリ、コリの緩和

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認してください。
- 衣類として着用してください。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。
- 本商品は素肌の上に直接着用してください。

【使用上の注意】

- 初回着用前に洗濯することを、おすすめします。
- 洗濯は裏返しにしてネットに入れて洗ってください。
- 漂白剤、蛍光増白剤を含んだ洗剤は、使用しないでください。
- 色物は他のものと一緒に洗わないでください。
- ファスナーが付いている製品は、閉じて洗ってください。
- 水につけたまま他の洗濯物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。
- 洗濯後は速やかに形を整え日陰で干して下さい。
- アイロン掛けを行う際は当て布を使用し、プリントマーク、刺繍部分へのアイロンはお避けください。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まりますので、十分な水分補給を行ってください。
- 体質などにより、着用時肌に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 素材の性質上、多少収縮する可能性があります。
- 湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意してください。
- 光により変色することがありますので、太陽光や蛍光灯などが長時間当たる所で保管しないでください。
- 製品洗いを施している製品は、一点一点色の落ち具合や風合い、サイズが異なる場合がございますので予めご了承ください。
- プリントが施されている製品は、プリントの特性上一点一点形や色が若干異なる場合がございます。
- プリント、マーク部分へのもみ洗いをお避け下さい。
- 本商品の医療機器効能効果は上下セット着用時のものとなります。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取扱上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

ヘインズブランドジャパン株式会社
〒160-0016 東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館3階
カスタマーセンターTEL 0120-456-042

ご使用前に必ずこの文書をお読みください