

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001
疲労回復サポートウェア

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常があるときは使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

寸法（単位：cm／公差：±10%）

1 長袖スウェット



	M	L	LL	3L
身丈	64	67	70	72
身巾	55	57	59	61

2 ロングパンツ



	M	L	LL	3L
ウエスト	72	78	86	90
ヒップ	109	115	123	127
股下	69	70.5	71.5	71.5

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させ、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリの症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的または効果】

【遠赤外線の血行促進作用】

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉のこり、コリの緩和
- 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認してください。
- 衣類として着用してください。
- 日常生活時および睡眠時のいずれでも着用可能です。
- 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。
- 本品は素肌の上に直接着用してください。

【使用上の注意】

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まりますので、十分な水分補給を行ってください。
- 着用前に洗濯することを、おすすめします。
- 体質などにより、着用時に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 濡れた状態での放置や畳が置きっぱなしは、避けてください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、注意してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- タンブラー乾燥は、避けてください。

【保管方法および有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しないときは一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、注意してください。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

株式会社カインズ

〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1

電話：0120-87-7111

（受付時間：電話受付時間：10:00～18:00（元日を除く））