

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

RECOVERY CARE+ リカバリーケアプラス ポンチ

【禁忌・禁止】


- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 構造

寸法 (単位: cm/公差: ±10%)

1. ロングスリーブトップス (メンズ)

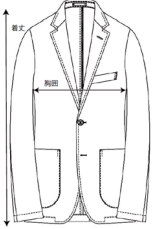


	S	M	BM	L	BL	LL	BLL
着丈	67	69	69	71	71	73	73
胸囲	101.5	105.5	110.5	109.5	114.5	113.5	118.5

2. ロングパンツ (メンズ)




	S	M	L	LL	3L
ウエスト	76	80	84	88	92
股下	70	70	74	74	74

3. ロングスリーブトップス (レディース)

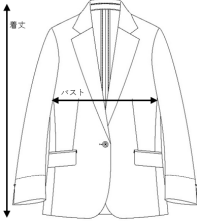

	S	M	L
着丈	60.5	61.5	62.5
バスト	92	95	98

4. ロングパンツ (レディース)

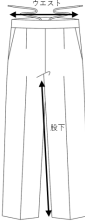


	S	M	L
ウエスト	68	71	74
股下	69	70	71

5. ロングスリーブカーディガン



	S	M	L	LL
着丈	67	69.5	72	74.5
身幅	52	55	58	61

6. 長袖クルーネック

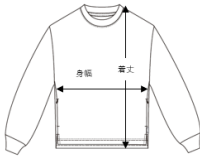

	S	M	L	LL
身丈	64	66.5	69	71.5
身幅	52	55	58	61

7. ロングパンツ



	S	M	L	LL
ウエスト	62	68	74	80
股下	65	65	67	69

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させ、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線血行促進作用】

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の力、力の緩和
- 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましい。
- 肌着等の上に着用してください。
- 上下セットでの着用をおすすめします。

【使用上の注意】

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。
- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、使用を中止すること。
- お洗濯の際は、畳んだ状態で洗濯ネットに入れてください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 濃色お洗濯で色落ち、色移りする可能性がございますので、淡色のものと分けて洗濯してください。
- タンブラー乾燥は避けください。
- 濡れた状態で放置しますと他のものに色移りする可能性があります。
- 着用中に干や水分を含んだ状態で摩擦されると色移りする可能性があります。
- 素材の特性上、洗濯や長時間の摩擦、揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。
- 毛玉が出来てしまった場合は、毛玉取り器やさみなどでお手入れください。
- 素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2 年

【取扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

販売業者：株式会社 AOKI

〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛谷 6-56

045-941-3488