


医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
SAM ニトリル グローブ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

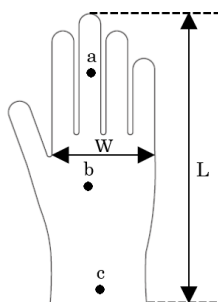

	W ±5	L ±10%	厚さ ±0.2		
			a	b	c
XS	75	240	0.06	0.07	0.08
S	85	240			
M	95	240			
L	105	240			
XL	115	240			

2. 原理

- ・□パウダーフリーのニトリル検査用手袋
- ・□使い捨てタイプ
- ・□左右兼用、未滅菌
- ・□XS,S,M,L,XL の5 サイズ
- ・□1箱100枚入り

【使用目的又は効果】

手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。

【使用方法等】

本品は再使用禁止である。

1. 箱を開封して、本品に破損がないことを確認する。
2. グローブを取り出し左右の手に装着する。

【使用上の注意】

- (1) 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。
- (2) 傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- (3) 異常を感じたら、使用を中止すること。
- (4) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損や穴等）が見られるものは使用しないこと。
- (5) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- (6) 薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。
- ・高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・有効期間は包装箱にきさいされている。（製造後3年）

【包装】

100枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

製造業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2丁目3-15 オフィスアイ201

製造国：ベトナム

問い合わせ先：日本織物中央卸商業組合連合会
TEL：052-201-5588