

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDN コード:37090010

商品名エンドスムーズサポ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>

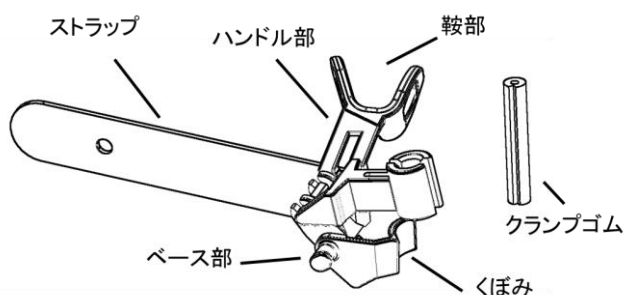

<材質>

ハンドル部:PLA 樹脂

ベース部 :PLA 樹脂

クランプゴム:シリコンゴム

ストラップ:シリコンゴム

<仕様>

推奨処置具外径: $\phi 1.9\text{ mm} \sim \phi 2.5\text{ mm}$

適合が確認されている内視鏡: オリンパスメディカルシステムズ株式会社製 GIF-Q260J、GIF-H290

<作動・動作原理>

本製品をストラップで内視鏡の操作部に固定し、クランプゴムで処置具をハンドル部に固定する。ハンドル部の鞍部を押し引きすると、その動作が処置具の進退動作に変換される。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡に内視鏡処置具の固定操作及び進退操作の機能を追加する。

【使用方法等】

<使用前>

- ・キズ、汚れ等の異常がないことを確認する。
- ・内視鏡やその付属品と同様に適切な消毒を行う。

<装着方法>

患者に内視鏡を挿入する前に、手順 1～7を一度行っておくこと。


1. 鉗子栓の突起の向きを横にする。



2. ベース部のくぼみを鉗子栓に押し付ける。



3. 左手の小指で鞍部を動かさないように押さえ、ストラップを伸ばしながら裏から表に巻き付けてベース部を留める。

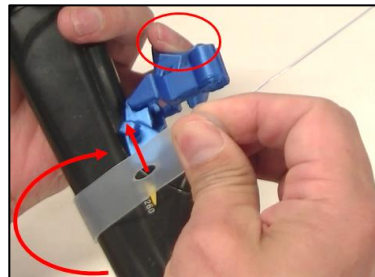

4. クランプゴムの中央穴に処置具を押し込む。




5. 処置具の通ったクランプゴムをハンドル部の穴に圧入する。



6. ハンドル部を一番手前に引いたときに処置具が鉗子口に格納されるよう、クランプゴムの位置を調整する。

7. ハンドルを操作した時に処置具がクランプゴムに対して滑らないかを確認する。

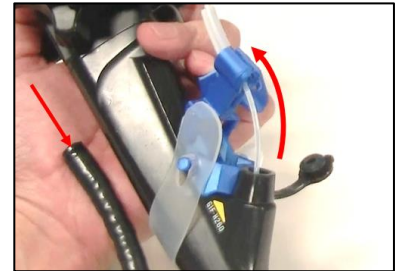

<操作方法>

左手小指をハンドル部の鞍部に置き、ハンドル部を手前に引くと処置具が引っ込み、押し出すと処置具が突出する。

<検査・治療終了後>

- ・ 本品と処置具を共に内視鏡から取り外す。
- ・ 汚染及び感染に注意し、本品を適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- ・ 各種滅菌方法(オートクレーブ、ガンマ線滅菌、EOG)による処理を行わないこと。変形や破損が生じる可能性がある。
- ・ 温水に接触させないこと。変形や破損が生じる可能性がある。
- ・ ハンドル部の操作に抵抗を感じたときは、無理に押し引きしないこと。処置具が折れ曲がるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、5～30℃、常湿でかつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。

<使用期限>

- ・ パッケージの使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社ブリッジジャパンメディカル
TEL 092-645-1345