

機械器具(25)医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード:31776000
販売名:エアショットミラーハンドル

- (1) **警告** ミラーヘッドを固定しているネジが緩んでいないか使用前には必ず確認すること。治療中にミラーヘッドの緩みを感じたら直ちに使用を中止すること。
- (2) 禁忌・禁止
① 製品本来の使用目的と違う用途で使用しないこと。
② 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。
- (3) 材質・形状・構造及び原理等
材質はステンレスである。診療台から導入した圧縮空気を、中空のミラーハンドルを通してミラーヘッドに噴出させ、水滴、曇りを防ぎ術中の視野を明瞭にする。
- (4) 使用目的又は効果
口腔内診査又は粘膜を圧排し、視野の確保を目的とする。
- (5) 使用方法
① 当製品は未滅菌製品であるため使用前には必ず滅菌すること。
② 診療台からの圧縮空気をフットペダルのチューブと接続するため、各メーカーの接続コネクタを用意して下さい(当社では設置作業・配管分岐作業の施工・手配は行っておりません)。
③ ミラーヘッドをミラーハンドルに挿入し、付属の専用レンチで固定ネジを確実に締める。
④ 圧縮空気をフットペダルで噴射させる。この時、バルブで適切な空気圧に調整する。
⑤ 従来どおりの方法で、患部の診察をする。
⑥ 治療終了後は、速やかにチューブからミラーハンドルを外す。
⑦ ミラーハンドル及びミラーヘッドに付着している血液、体液、組織及び薬品等は速やかに除去し、感染防止のために洗浄滅菌を行うこと。
- (6) 使用上の注意
① 本品は「使用目的又は効果」に記載されている用途以外に使用しないこと。
② 本品の使用前には異常がないか、必ず確認作業を行う。
③ 本品に異常が確認された場合は、速やかに器具の使用を中止する。
④ ミラーヘッド、ミラーハンドルは消耗品のため、異常が確認されたら新しい物と交換すること。ミラーヘッドを固定しているネジが締まらない場合、ネジの不良か、本体のネジ穴の不良か判別が難いため、直ちに新しい物と交換すること。
⑤ 付属の専用レンチ以外は使用しないこと。ネジ山が潰れる危険がある。
⑥ 圧縮空気の圧力は0.3MPa程度以下の空気圧に調整すること。過度な圧力によるホースの破損が生じることがある。又、強すぎると気腫の危険もある。
⑦ 本品を勝手に改造しないこと。
⑧ 本品は、歯科医師以外は使用しないこと。
⑨ 本製品はステンレス製であるため、使用前には患者に金属アレルギーの有無を確認すること。
- (7) 保管方法及び有効期間等
- ① 保存期間の長短に関わらず、腐食防止のために洗浄後必ず乾燥させること。
② 「もらい錆」を防ぐため、錆のある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と同一場所に保管しないこと。
③ 本品は、歯科医療従事者以外の手の届かないところに保管すること。
- (8) 取り扱い上の注意
市販のミラーヘッドを装着できますが、ミラーヘッドの軸の形状により装着できない物や、噴出空気の効果が出にくい物もあります。
- (9) 保守・点検に係る事項
① 本品は毎日、診療前、診療後に器具の異常がないか必ず確認作業を行うこと。特にミラーヘッドを固定しているネジに緩みがないか、又ミラーハンドルとチューブをつないでいるネジに異常はないか確認作業を行うこと。
② 圧縮空気圧が適切であるか使用前には必ずバルブを調整して、適切な圧力に調整すること。
- (10) 弊社では設置作業・配管分岐作業の施工・手配は行っておりません。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等
有限会社 プラス 医療機器部
三重県桑名市中央町2-34
TEL 0594-24-0418
FAX 0594-24-0417