

機械器具 (12) 理学診療用器具
* 管理医療機器 超音波プローブ穿刺用キット 70017000
「電子コンパックス探触子 UST-934N-3.5」のオプション
穿刺アダプタ MP-2408B

【警告】

本品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニューレの操作を慎重に行うこと。

[電気手術器のニードルカニューレを本品に挿入する際及び本品に沿って出し入れを行う際、ニードルカニューレ上の絶縁皮膜を破壊させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こす可能性がある。]

【禁忌・禁止】

心臓付近への穿刺を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成


- | | |
|----------------|-------------|
| ① 穿刺アダプタ本体 | MP-2408B-MB |
| ② 針ストップ | MP-2477 |
| ③ 深さゲージ | MP-2408B-DG |
| ④ 調整用六角レンチドライバ | |

2. 体に接触する可能性のある部分の原材料

・ステンレス

3. 外観図


穿刺アダプタ本体

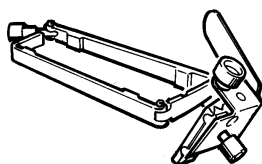

針ストップ




深さゲージ

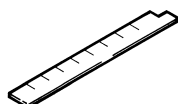

調整用

六角レンチドライバ

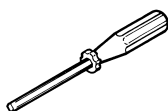


【使用目的又は効果】

適合する超音波画像診断装置用プローブに接続し、超音波画像ガイド下の穿刺術を行う。

【使用方法等】

- 適用可能な超音波画像診断装置用プローブに穿刺アダプタ本体を正しく取付ける。

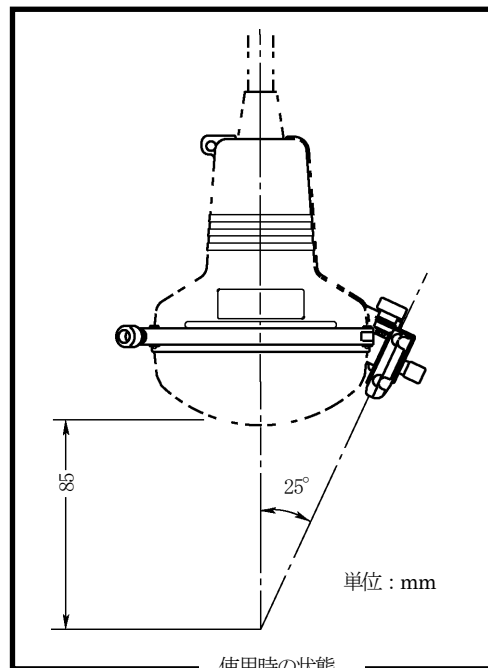

- 使用前準備を行う。(取扱説明書 6 項を参照)
- 探触子を当該汎用超音波画像診断装置の所定の接座座へ接続して適切な動作状態に調整する。
- 穿刺ガイドラインをモニタ上に表示させる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に 40℃の温水にて針エコーが穿刺ガイドラインと一致することを確認すること。
- 消毒・滅菌を行った上で使用すること。
- 本品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等がなく、スムーズに可動することを確認の上、慎重に操作すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：3 年（自己認証データによる）

【保守・点検に係る事項】

* 〈使用者による保守点検（日常点検）〉

1) 目視による点検

(1) 外観の確認

・本品に損傷や磨耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

・本品の洗浄・消毒方法は、取扱説明書等の指示に従って行うこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

2) 機能の確認

(1) 正常状態の確認

本品の正常状態・正常動作を確認すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

(業者による保守点検)

定期点検を弊社又は弊社の指定する業者に依頼すること。

点検項目	頻度
安全点検	1 回／年

詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

* 富士フイルムヘルスケア株式会社

04-7131-4151