

2023年4月作成（第1版）

歯科用材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)

DT 水洗いレジン

（形状・構造及び原理等）

主成分：エポキシアンアクリレート樹脂

形状：粘ちょうの液体

原理：光照射により重合硬化

（使用目的又は効果）

本材は歯科用模型及び修復物の製作過程で用いる。

（使用方法等）

本材との使用を推薦する医療機器

・フローズン ソニック 8KM

（届出番号 13B1X10371000012）

- ① 本材の容器を約3分間振ってから、3Dプリンターのトレイに注ぐ。
- ② トレイ内のレジンをスプチュア等でゆっくりと攪拌する。
- ③ 3Dプリンターの取扱説明書に従い、製作データを読み込み、造形開始する。
- ④ 造形終了後、プラットフォームを取り出し、造形物を上向きにし、金属のヘラでプラットフォームから造形物を取り出す。
- ⑤ 造形物は中性洗剤でよく洗浄して、エア等で水分を飛ばす。

（使用上の注意）

- ① 本材を扱う際は必ずグローブをする事
- ② 本材を皮膚に付着した場合は流水で洗浄する事。万一目に入った場合には、大量の流水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受ける事
- ③ 本材の使用により、皮膚炎、発疹などの過敏症状が出た場合は、使用を中止し、すぐに医師の診察を受ける事。
- ④ 口腔内使用は不可である。

（保管方法及有効期間等）

保管方法：本材は 28°C以下の暗室でしっかりと

蓋を閉め保管する事

有効期限：製造年月日より1年間

<製造販売業者>

Fuss 合同会社

電話番号 050-5474-1999

<製造業者>

Phrozen Technology

製造国 中華民国（台湾）