

* 2026 年 7 月作成(第 2 版)
2023 年 4 月作成(第 1 版)

歯科用材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)

DT 水洗いレジン

【形状・構造及び原理等】

主成分:エポキシアンアクリレート樹脂
形状:粘ちようの液体
原理:光照射により重合硬化

【使用目的または効果】

本材は歯科用模型及び修復物の製作過程で用いる。

【使用方法等】

本材との使用を推薦する医療機器
・フローズン ソニック8K M
(届出番号 13B1X10371000012)

- ① 本材の容器を約3分間振ってから、3D プリンターのトレイに注ぐ。
- ② トレイ内のレジンをスパチュラ等でゆっくりと攪拌する。
- ③ 3D プリンターの取扱説明書に従い、製作データーを読み込み、造形開始する。
- ④ 造形終了後、プラットフォームを取り出し、造形物を上向きにし、金属のヘラでプラットフォームから造形物を取り出す。
- ⑤ 造形物は中性洗剤でよく洗浄して、エアー等で水分を飛ばす。

【使用上の注意】

- ① 本材を扱う際は必ずグローブをする事
- ② 本材を皮膚に付着した場合は流水で洗浄する事。万一目に入った場合には、大量の流水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受ける事
- ③ 本材の使用により、皮膚炎、発疹などの過敏症状が出た場合は、使用を中止し、すぐに医師の診察を受ける事。
- ④ 口腔内使用は不可である。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:本材は 28℃以下の暗室でしっかりと蓋を閉め保管する事
有効期限:製造年月日より 1 年間

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : Fuss 合同会社
電 話 : 050-5474-1999
製造業者 : Phrozen Tech co., Ltd.
国 名 : 中華民国(台湾)