

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (31776000)
排唾管付きミラー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



サイズ

全長：150mm (±10%)

ミラー：直径 20mm

2. 原材料

鏡：ガラス

柄：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

口腔内診査を実施する際、併せて口腔内に滞留する水分および切削片を除去するために用いる。本製品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本製品包装に破れ等の損傷が無いことを確認する。
2. 本製品にバリや損傷が無いことを確認する。
3. 排唾管のソケットに挿し込む。

【使用上の注意】

1. 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。破損する恐れがある。
2. 使用前に変形やひび等がないか正常に作動するかを確認すること。
3. 劣化や破損などの以上が見られた場合、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔で高温多湿でない場所に保管すること。
2. 保管中、本製品が変形してしまわないよう荷重を加えないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に、汚染、破損、腐食またはミラーの曇りがないことを確認すること。これらが確認された場合は使用しないこと。
2. 廃棄について、必ず医療廃棄物として処理すること。

<製造販売業者>

Fuss 合同会社

電話番号 050-5474-1999