

歯科用材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)

DTレジンロック

(形状・構造及び原理等)

主成分：4-アクリロイルモルホリン

形状：粘ちょうの液体

原理：光照射により重合硬化

色：青、灰、橙

(使用目的又は効果)

本材は歯科用模型及び修復物の製作過程で用いる。

(使用方法等)

- 本材の容器を約3分間振ってから、3Dプリンターのトレイに注ぐ。
- トレイ内のレジンを手動等でゆっくりと攪拌する。
- 3Dプリンターの取扱説明書に従い、製作データを読み込み、造形開始する。
- 造形終了後、プラットフォームを取り出し、造形物を上向きにし、金属のヘラでプラットフォームから造形物を取り出す。
- 造形物は中性洗剤でよく洗浄して、エア等で水分を飛ばす。

(使用上の注意)

- 本材を扱う際は必ずグローブをする事
- 本材を皮膚に付着した場合は流水で洗浄する事。万一目に入った場合には、大量の流水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受ける事
- 本材の使用により、皮膚炎、発疹などの過敏症状が出た場合は、使用を中止し、すぐに医師の診察を受ける事。
- 口腔内使用は不可である。

(保管方法及有効期間等)

保管方法：本材は27°C以下の暗室でしっかりと蓋を閉め保管する事

有効期限：製造年月日より1年間

(製造販売業者)

Fuss合同会社

東京都品川区西五反田7-22-17

電話番号 050-5474-1999