

歯科用材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス(16189000)  
**ワックスディスク**

**【形状・構造及び原理等】**

材料：ワックス、顔料

色調：ホワイト、アイボリー、グリーン、ピンク、  
グレー、ブラウン、ブルー、ダークグリーン

形状、構造：

円形ディスク(D)



厚さ

10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm

20mm, 22mm, 25mm, 30mm

**【使用目的又は効果】**

ロストワックス法による固定式補綴修復物または義歯補綴物のキャストリングワックスまたは試適用のワックスパターン製作などに用いるワックスである。

**【使用方法等】**

- ① CAD/CAM 装置で本製品を切削加工する。
- ② 得られた形態を調整した後、鑄造・研磨を行う。

[使用方法に関する使用上の注意]

- ① ヒートショック使用の場合はワックスパターンの間隔を 2mm 以上空けて植立すること。
- ② 室温下(15°C~25°C)で使用すること。
- ③ 急速加熱を避ける場合、250°Cで 60 分係留すること。

**【使用上の注意】**

- ① 本製品焼却の際は、排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び上記を吸入しないこと。
- ② 本製品使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③ 本製品は可燃性物質のため、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ④ 本製品の使用により、発疹、湿疹、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。

**【保管方法及有効期間等】**

保管方法

- ・ 40°C以下で保管すること。
- ・ 郵送の際や保管の際、高温となる場所(直射日光の当たる場所など)に放置しないこと
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科医療従事者以外の者が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者】**

Fuss合同会社

東京都品川区西五反田7-22-17

電話番号：050-5474-1999