

セラミックダイヤモンド

【形状・構造及び原理等】

【構造】

作業部

DZ シリーズ：セラミックダイヤモンド

PZ シリーズ：シリコンダイヤモンド

軸部：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

陶材、セラミックス等の補綴修復物の研削に用いる器材

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 本製品は、歯科用の電動ハンドピースや電気モーター、マイクロモーター等に取り付け、一般的な操作手順に従ってご使用いただけます。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) ハンドピースの製造元が定める取扱説明に従い、シャックを確実に奥まで挿入し、半挿し（半チャック）になっていないことを確認してください。
- 2) 使用の前には空転させて予備回転を行い、ブレや振動がないことを確認してください。
- 3) 先端が細長いものや大型のヘッド形状の製品は、破損や変形の恐れがあるため、過度な力を加えたり、不自然な角度での使用は避けてください。
- 4)

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 指定された最大許容回転数を超えての使用は避けてください。

最高許容回転数速度：30,000rpm

- 2) 本製品はエアータービンでは使用しないでください。
- 3) 変形や損傷（錆、表面のキズ、曲がり、汚れ等）が確認されたものは使用しないでください。
- 4) 本製品による研削・研磨作業を行う際は、局所排気装置や、公的機関が認可した防塵マスクを適切に使用してください。
- 5) 目の保護のため、安全ゴーグル等の保護具を着用してください。

【保管方法及有効期間等】

【保管方法】

- 1) 水分や腐食性のある薬剤・その蒸気にさらされないよう注意し、物理的な衝撃や汚染を避けてください。保管は1～30℃の室温環境下で行ってください。
- 2) 本製品は歯科従事者以外が触れないよう、適切な場所で保管・管理してください。

【製造販売業者】

Fuss合同会社

東京都品川区西五反田7-22-17

電話番号：050-5474-1999