

機械器具 7 内臓機能代用器
管理医療機器 血液回路用チューブ接続用コネクタ 70545102
コネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止
 - 2) 再滅菌禁止

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 平和物産株式会社
電 話 番 号： 03-3287-0731
製 造 業 者： 三矢メディカル株式会社

【形状・構造及び原理等】

1. 構造・構成ユニット

1) 構成

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。本品は、医療用チューブを接続するコネクターであり、コネクターの形状には、ストレート型（図 1）と分岐型（図 2）があり、又それぞれにルア・ロック接続部を有する（図 3、図 4）ものもある。

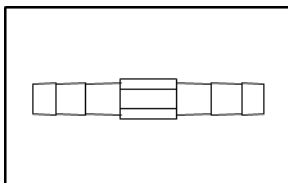


図 1

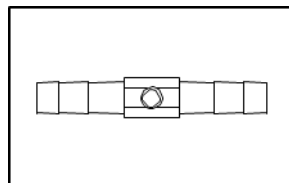


図 3

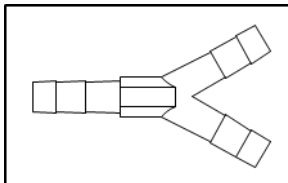


図 2

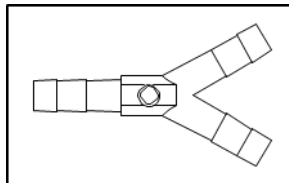


図 4

2. 作動・動作原理

滅菌済みの医療用チューブ同士を連結するために接続するコネクターである。

【使用方法等】

1. 使用方法

チューブが外れることの無いようにコネクターの根元までしっかり接続する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品にハロゲン化炭化水素性麻酔剤やアルコール・エーテル等の有機溶剤を使用しないこと。又、他に使用する際も本品に接触しないように注意すること。
- 2) 本品は可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温多湿や直射日光を避けること。

2. 有効期間

滅菌後 3 年 [自己認証（当社データ）による]
被包レーベル内“使用期限”に記載

V02