

## 再使用禁止

# コバス® MSwab 検体採取キット

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

1セット中


1. フロックスワブ(滅菌済)  
ナイロンファイバーのチップ付綿棒
2. MSwab メディア  
トリス塩酸緩衝液  
EDTA  
ジメチルスルホキシド  
ウシ血清アルブミン

### 【使用目的又は効果】


検査のための試料を採取することを目的とした器具

### 【使用方法等】


#### 1. 使用方法

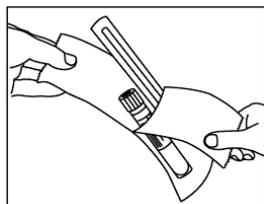


(1) パウチを開けます。

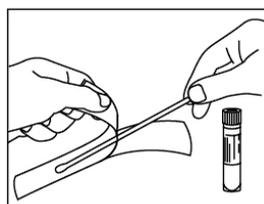


(2) MSwab メディアとフロックスワブをパウチから取り出します。

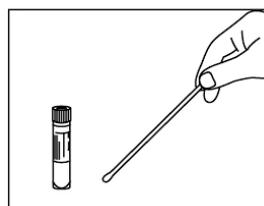


(3) スワブの上部を持ち、検体を採取してください。このとき、チップには手を触れないようにしてください。

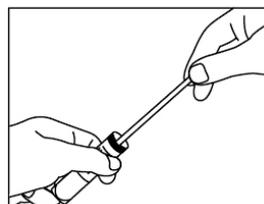

(4) 検体採取後、MSwab メディアのキャップを取り外し、スワブを印のついている切断位置まで容器に挿入します。

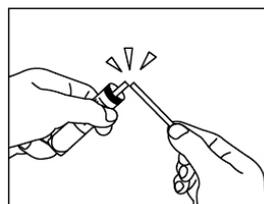

(5) スワブをMSwab メディアの容器の縁に当て、切断点で折り切ります。手元に残ったスワブの柄部分は廃棄してください。

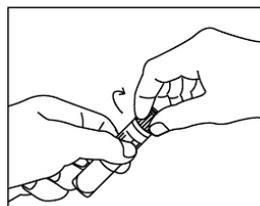

(6) MSwab メディアのキャップをしっかりと閉めます。

#### 2. 検体の安定性

検体を保存した「MSwab メディア」は、20～25℃で14日間、4℃で21日間、-20℃で6か月間安定です。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) MSwab による検体採取は、じゅうぶん習熟した人の指示のもとに実施してください。
- (2) 血液が大量に混入している検体では、偽陰性又は判定無効となる可能性がありますので注意してください。
- (3) 本製品は滅菌済みですので、包装に破れ及びピンホールがあった場合には使用しないでください。
- (4) MSwab メディアの溶液をこぼした場合には、すぐに水で希釈してから拭き取ってください。
- (5) MSwab メディアの溶液をつけたスワブは、絶対に検体採取に使用しないでください。
- (6) 本品は必ず保管方法に従って保存し、指定の条件以外で保存したものや使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

#### 2. その他の注意

- (1) 本品は、「コバス 4800 システム MRSA/SA」キットでの測定検体の採取と輸送を行うためのものです。それ以外の用途に使用しないでください。
- (2) 感染を防ぐため、検体の採取及び取扱いには必ず感染防止用保護手袋・保護眼鏡・保護衣などを着用してください。検体採取終了後は手をよく洗ってください。
- (3) 検体が身体に付着した場合には、洗浄と消毒を実施し、必要であれば医師の手当てなどを受けてください。
- (4) 使用済みのスワブ及びMSwab メディア、又は未使用のMSwab メディアの廃棄に際しては、廃液及び廃棄物の関連法令に従って適切な処理を行ってください。
- (5) 検体採取済みのスワブが入ったMSwab メディアの輸送に際しては、関連法令に従って適切な処理を行ってください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

5～25℃で保存してください。

#### 2. 有効期間

18ヵ月

使用期限(Exp.)は外箱及び個包装に記載してあります。

[自己認証による]



**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売: ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社  
連絡先: ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社  
カスタマーサポートセンター  
TEL:0120-600-152



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社