

類別:器80 はり又はきゅう用器具

管理医療機器 一般的名称:滅菌済み鍼 JMDNコード:34175000

再使用禁止

ニュー・ラーカバン ラーカバン・クリア

** 【禁忌・禁止】

1)次の患者には使用しないこと。

アレルギー体質


2)使用方法について

1回限りの使用とし、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、はりを布ばんテープ(絆創膏)もしくはポリエチレンテープに取り付けたものである。

1. 形状

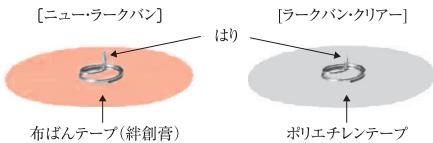

2. 原材料

- ・はり(鍼体及び2段型円環台金よりなる):ステンレス鋼線材
- ・テープ[ニュー・ラーカバン] 布ばん(絆創膏):伸縮布
[ラーカバン・クリア] ポリエチレン
- ・接着剤:合成ゴム系粘着剤
- ・離型紙:クレイコート紙・ポリスチレン押出発泡シート
- ・針床:ポリスチレン樹脂

** 3. その他

(1) 無菌性の保証	無菌性保証水準(SAL): 10^{-6}
(2) 抽出金属物について [JIS T9301:2016 (化学的要件事項)]	鉛、亜鉛、鉄の総量5mg/ℓ以下 カドミウムの抽出液の含量は 0.1mg/ℓ以下

【使用目的又は効果】

本品は鍼治療に使用する。

【使用方法等】

(1)内袋を破ってシートを取り出し、表面の白い紙の片方を、ゆっくり1ますごとに切り離します。次に切れ目にそって引き上げながら本品を取り出して使用して下さい。なお、製品は1ます毎に滅菌されておりますので、ご使用になる直前に取り出してください。

(2)貼るところは、「消毒用アルコール」などで拭いて下さい。

** 【使用上の注意】

- (1)本品は「使い捨て」です。1回限りの使用とし、再使用しないで下さい。
- (2)使用後は患部を「消毒用アルコール」で消毒することが望ましいです。
- (3)台紙が引き上げにくいときは、直接テープを取ってご使用下さい。
- (4)テープを貼る部位は固定しやすく、身体の活動の妨げにならない部位を選んで下さい。
- (5)テープを貼る部位を定めてからその皮膚面に密着させて貼って下さい。このときテープの粘着部分に手指が触れると粘着力が低下しますので、ご注意下さい。
- (6)傷や皮膚病のあるところ、皮下層の薄いところ、陰部、目、鼻、口、耳の周辺及び毛髪内、毛髪に接するところ、手のひら、足の裏等には使用しないで下さい。
- (7)貼付部をかいたりこすったりしないで下さい。
- (8)皮膚の状態や個人差によりテープが剥がれて脱落することがありますので、ご注意下さい。脱落を防ぐために早めの交換をお勧めします。
- (9)入浴時、入浴後には貼付部が剥がれていなか確認し、タオル等で強くこすらないで下さい。
- (10)テープの取り外しは注意して行って下さい。
- (11)使用後ははりがむき出しじゃならないようにして、破棄して下さい。
- (12)使用中に異常を感じたときは使用を中止し、医師又は専門医に相談して下さい。

** 【保管方法及び有効期間等】

- (1)開封後、未使用のものはケースの中に入れて保管して下さい。また、最後の使用が終わるまでケースを捨てないで下さい。
- (2)開封後はできるだけお早めにご使用下さい。
- (3)乳幼児の手の届くところには保管しないで下さい。
- (4)湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。

有効期間:使用期限は外箱に記載(自己認証(弊社データ)による)

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

 平和メディク株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

