

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子 (JMDNコード：1 0 1 7 2 0 0 0)

滅菌綿棒

再使用禁止 規格コード 1 0 1

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

紙軸の片側先端に綿を巻きつけたものです。

軸の材質	綿体の材質	軸の径	全長	綿体の径
紙	レーヨン	φ 1.5 mm	148 mm	φ 3.0 mm

【使用目的又は効果】

医療用捲綿子
ウイルス抗原検査の検体採取に使用
滅菌済のため、直ちに使用可能

【使用方法等】

綿体部分を汚染ないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させたりして使用しないでください。
- 3) 検体を採取する時は、綿棒の軸を折らないようご注意ください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 6) 使用後は速やかに滅菌処理をしてから廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉
水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること。
〈有効期間〉
滅菌日より 3 年 [自己認証 (当社データ) による]

【包装】

個包装 : 5 0 本 / 箱
カタログ番号 : 2 5 2 0 9 5
品名 : 滅菌綿棒 (5 0 本入り)

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 平和メディック株式会社
TEL : 0577-33-0511

販売元 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〈お問い合わせ先〉
カスタマーサービス 0120-8555-90