

## 滅菌綿棒

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること

有効期間: 滅菌日より3年

[ 自己認証(当社データによる) ]

### 【形状・構造及び原理等】

紙軸の片側先端に綿を巻きつけたものです。

軸の材質	紙
綿体の材質	コットン100%
軸の径	φ2.5 mm
全長	149 mm
綿体の径	φ5.0 mm

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディク株式会社

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

### 問い合わせ先

富士製薬工業株式会社 富山工場 学術情報課

〒939-3515

富山県富山市水橋辻ケ堂 1515 番地

TEL 076-478-0032 FAX 076-478-0336

### 【使用目的又は効果】

滅菌済み医療用捲綿子

各種検査の検体採取に使用

### 【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

### 【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 軸を折らないようご注意ください。
- 3) 検体を採取する時は、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。
- 4) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 5) 使用後は速やかに滅菌処理をしてから廃棄してください。