

**2020年4月改訂(第5版)

**届出番号 21B2X1001200006

*2017年1月改訂(第4版)

類別：機械器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

再使用禁止

滅菌綿棒 F-C CM

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディク株式会社

*〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである

全長 約156mm

綿長 約15mm

綿径 約3mm

【販売元】

積水メディカル株式会社

お問い合わせ先

TEL 0120-249-977 FAX 0120-247-477

【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください
- 2) 凍結や加熱をしないでください
- 3) 本製品を使用する時は、綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください
- 4) 検体を直接採取する時は、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください
- 7) 使用後は速やかに滅菌処理をしてから廃棄してください

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること

有効期間：滅菌日より4年〔自己認証(当社データ)による〕