

類別：機械器具54 医療用捲綿子
一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子 (JMDNコード：10172000)

再使用禁止

滅菌綿棒(K)P6S

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディク株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

【使用目的又は効果】

薬剤の塗布及び各種検査の検体採取等に使用。

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で薬剤の塗布及び検体等を採用する。

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようにご注意ください。小児等では検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 検体を直接採取するとき、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 7) 使用後は速やかに滅菌処理をしてから廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること

有効期間：滅菌日より3年〔自己認証(弊社データ)による〕