

類別：機械器具54 医療用捲綿子  
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

## ベスケア ホスピタル綿棒 W266-1本

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な所に箱パッケージのまま保管すること。

有効期間：滅菌日より3年〔自己認証（当社データ）による〕

### 【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

全長 約 152mm  
綿長 約 22mm  
綿径 約 12mm

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 平和メディック株式会社

TEL 0577-33-0511

FAX 0577-33-0819

### 【使用目的又は効果】

薬剤の塗布及び各種検査の検体採取等に使用。

販売業者 アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2-1-27

TEL 0120-711-875

受付時間：平日 9:00～17:30

（土・日・祝日・弊社休業日は除く）

### 【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装から取り出し、綿体部分で薬剤を塗布、もしくは、検体を採取する。

### 【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。  
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 7) 使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。