

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子  
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子 (JMDNコード：10172000)

## AG紙軸綿棒小 (φ8mm強コート)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

TEL 0577-33-0511

FAX 0577-33-0819

### 【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

|        |          |
|--------|----------|
| 材質(繊維) | コットン     |
| 材質(軸部) | 紙        |
| 全長     | 約 106 mm |
| 綿長     | 約 20 mm  |
| 綿径     | 約 8mm    |

### 【使用目的又は効果】

薬剤を塗布する。

### 【使用方法等】

包装から本品を取り出し、綿体部分に薬剤を含ませる。

### 【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。  
小児等では、使用中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 薬剤を塗布する部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること。