

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子 (JMDNコード：10172000)

AG木軸綿棒 (弱コート)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

TEL 0577-33-0511

FAX 0577-33-0819

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

材質(繊維)	コットン
材質(軸部)	木
全長	約 108 mm
綿長	約 20 mm
綿径	約 10.5 mm

【使用目的又は効果】

薬剤を塗布する。

【使用方法等】

包装から本品を取り出し、綿体部分に薬剤を含ませる。

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、使用中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 薬剤を塗布する部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること。