

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子  
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDN コード：10172000）

## メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1 5 1 2

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な所に  
箱/パッケージのまま保管すること。

有効期間：滅菌日より 3 年 [自己認証（弊社データ）による]

### 【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

### 【包装】

個包装：100 袋/箱

### 【使用目的又は効果】

薬剤の塗布及び各種検査の検体採取等に使用。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

平和メディク株式会社

〒506-0041

岐阜県高山市下切町 180

TEL 0577-33-0511

FAX 0577-33-0819

製造業者

平和メディク株式会社

### 【使用方法等】

綿体部分を汚染ないように包装から取出し、綿体部分で薬剤の塗  
布及び各種検査の検体を採取する。

### 【品目仕様等】

全長 約 152 mm

綿長 約 22 mm

綿径 約 12 mm

### 【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 7) 使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。