

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子

一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

滅菌綿棒 1mL 吸水タイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

8) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。

9) 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：個包装に記載〔自己認証(当社データ)による〕

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。

検体採取後に軸を折り切るためのカットライン(折り曲げ溝)が

綿体先端から約 80 mm の部分に設けられています。

〔材質〕

- ・綿体：コットンとポリオレフィンの混紡
- ・軸：ポリスチレン

〔寸法〕

- ・全長：約 158 mm
- ・綿体長：約 23 mm
- ・綿体径：約 12 mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 平和メディック株式会社
〒506-0041
岐阜県高山市下切町 180
TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

販売業者 シスメックス株式会社
神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号
＜問い合わせ先＞
シスメックス株式会社 カスタマーサポートセンター
神戸市西区室谷 1 丁目 3 番地の 2
TEL 0120-413-034

【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する。

本品は、唾液採取専用の綿棒として使用する。

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 4) 唾液採取用のため、鼻腔や咽頭などの別部位で使用しないでください。
- 5) 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう注意してください。
- *6) 検体を採取した後、歯、歯肉、舌、頬の表面に綿体が触れると綿抜けを招く原因となるので注意してください。
- 7) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。