

類別：機械器具54 医療用捲綿子

一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

エンドスワブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。



・本品には以下の原材料を使用している。

構成部品	原材料
綿体	綿
軸	紙

【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内で薬剤を塗布または治療を適用すること、若しくは検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

本品は、シュヴァルツ スワブホルダー専用の綿棒として使用する。

【使用方法等】

綿体部分が汚染されないよう包装から本品を取り出し、スワブホルダー先端部より本品を差し込み、固定して使用する。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は指定のスワブホルダー（販売名：シュヴァルツ スワブホルダー、届出番号：20B1X10002000237）と組み合わせて使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

本品のみでの使用を避け、本品との併用を意図しない手術器械を組み合わせ使用しないこと。[本品を正しく使用もしくは取り外しできない恐れがあるため]

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。

- 3) 本品をスワブホルダーに挿入する際は、ゆっくり丁寧にいき、軸を折らないように注意してください。
- 4) 使用の際は先端に過度な力をかけると軸折れを招く原因となるので注意してください。
- 5) 使用後は滅菌処理等を行ってから廃棄してください。廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：滅菌日より3年〔自己認証(当社データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 平和メディック株式会社
〒506-0041
岐阜県高山市下切町180
TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

販売業者 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033
東京都文京区本郷2-38-16
TEL 03-3814-2522