

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子

一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

## スッキリ綿棒

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【保管方法及び有効期間等】


保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：使用期限は外箱に記載【自己認証(自社データ)による】

### 【形状・構造及び原理等】

〔外観図〕

本品は軸の片辺に繊維を取り付け、繊維に薬剤を含浸させたものである。

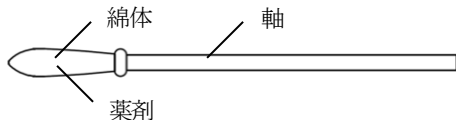

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

〔材質〕

- ・綿体：コットン
- ・軸：紙軸
- ・薬剤：白色ワセリン（日局）

〔寸法〕

- ・全長：約 80mm
- ・綿体長：約 20mm
- ・綿体径：約 5mm

### 【使用目的又は効果】

白色ワセリンを含有する器具

### 【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分を肛門に挿入して使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品は「使い捨て」です。1回限りの使用とし再使用しないで下さい。
- 2) 使用中に異常を感じたときは使用を中止し、医師又は専門医に相談して下さい。
- 3) 小児等では使用時に体や足を動かすことがあるため、挿入する際に、肛門を傷つけないよう注意してください。
- 4) 開封後は速やかに使用してください。
- 5) 凍結や加熱をしないでください。
- 6) 綿棒の軸を折ったり曲げたりしないようにご注意ください。

必ずご参照下さい