

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子

一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

滅菌紙軸綿棒 H N A ・ P S

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

7) 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。

【保管方法及び有効期間等】保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な所に保管すること。

有効期間：個包装に記載〔自己認証(当社データ)による〕

【材質】

綿体：レーヨン 軸：紙

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディク株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町 180 番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

【寸法】

全長：約 149mm 綿体長：約 15mm

綿体径：約 5mm

【外観図】

綿体



軸

**【使用目的又は効果】**

各種検査の検体採取に使用する。

【使用方法等】綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を
採取する。**【使用上の注意】**

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に
注意してください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう
注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り
扱ってください。