

類別：機械器具 5 4 医療用捲綿子

一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

メディクスワブ植毛綿棒 NA02 PP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。

【材質】


綿体：ナイロン 軸：ナイロン

【寸法】

全長：約 151 mm 綿体長：約 17 mm

綿体径：約 3 mm

【外観図】

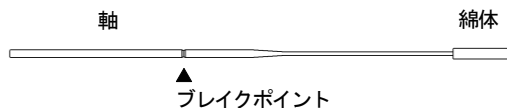

検体採取後に軸を折り切るためのブレイクポイント（折り曲げ溝）が
綿体先端から約 98.5 mm の部分に設けられています。

【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する。
主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取用に適しています。

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を
採取する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

検体を直接採取する時は、本品を強く押す、過剰に折り曲げるなどし
ないでください。〔軸折れを招く原因となるため〕

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください。
- 2) 凍結や加熱をしないでください。
- 3) 綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に
注意してください。
- 4) 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう
注意してください。
- 5) 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り
扱ってください。
- 7) 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な所に保管すること。

有効期間：外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町 180 番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819