

類別：機械器具54 医療用捲綿子  
一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

## メディクスワブ植毛綿棒 PH01 PP

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【使用上の注意】

- 開封後は速やかに使用してください。
- 凍結や加熱をしないでください。
- 綿棒の軸を折らないようご注意ください。  
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう注意してください。
- 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。


#### 〔材質〕

- 綿体：ナイロン
- 軸：ナイロン

#### 〔寸法〕

- 全長：約 148 mm
- 綿体長：約 17 mm
- 綿体径：約 4.5 mm

#### 〔外観図〕

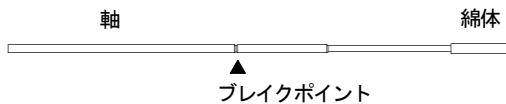

検体採取後に軸を折り切るためのブレイクポイント（折り曲げ溝）が綿体先端から約80mmの部分に設けられています。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：外箱に記載〔自己認証(当社データ)による〕

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

### 【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する。

\*\* 試料採取部位：咽頭、鼻、膣、直腸、糞便、創傷等

### 【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

#### 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

検体を直接採取する時は、本品を強く押す、過剰に折り曲げるなどしないでください。〔軸折れを招く原因となるため〕