

類別：機械器具 5.4 医療用巻綿子
一般医療機器 一般的名称：医科用巻綿子（JMDNコード：10172000）

フォーリーカテーテルキット用綿棒

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない、清潔な所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけたものである。

〔外観図〕



〔材質〕

- 綿体：コットン
- 軸：プラスチック（ポリプロピレン）

〔寸法〕

- 全長：約 122 mm
- 綿体長：約 40 mm
- 綿体径：約 14 mm

【使用目的又は効果】

薬剤を塗布する。

【使用方法等】

綿体部分に薬剤を含ませて、薬剤を塗布する。

【使用上の注意】

- 開封後は速やかに使用してください。
- 凍結や加熱をしないでください。
- 本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。
小児等では、使用中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 使用する部位を傷つけないよう注意してください。
- 使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819