

\*\* 機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)

## ディスペンシングガン2 ミキシングチップ

再使用禁止 (ミキシングチップ)

### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

ミキシングチップは再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. ディスペンシングガン2

材質：プラスチック


原理：カートリッジ式印象材を本品に装着し、本品を  
作動させると、印象材が押し出される。

#### 2. ミキシングチップ

練和部の太さが異なる「グリーン」と「イエロー」の  
2タイプがある。

材質：プラスチック

原理：カートリッジ式印象材の先端に本品を取り付け  
印象材を押し出すと、本品内部で印象材が練和  
される。

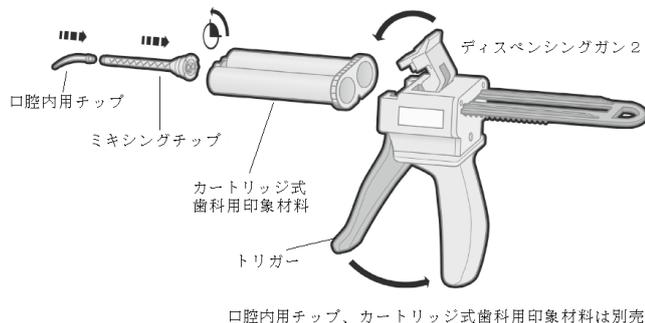

### 【使用目的又は効果】

カートリッジ式歯科用印象材料を練和するための器具。

### 【使用方法等】

#### 1. ディスペンシングガン2

使用するカートリッジの種類によってガンのタイプが  
異なります。ディスペンシングガン2は、ベースとキャ  
タリストが同量または 2:1 のカートリッジ式印象材に  
使用します。

#### 2. ミキシングチップ

ミキシングチップは、カートリッジ式印象材のキャップ  
の色に合わせて選択します。

カートリッジのキャップ	ミキシングチップ
グリーン	グリーン (練和部が太い)
イエロー	イエロー (練和部が細い)

#### 3. 操作方法

カートリッジ式印象材をディスペンシングガン2に装着  
し、少し注出させてください。その後、ミキシングチッ  
プを装着しトリガーを引くと、ミキシングチップ内部で  
印象材が練和され、注出されます。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保  
管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151 (代表)