

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科高温鑄造用埋没材（70900020）

\*\* ヘラベスト 練和液

【形状・構造及び原理等】

形状：液体  
成分：コロイダルシリカ、その他  
原理：リン酸塩系埋没材と本品（専用練和液）を混和すると硬化し、鑄型となる。

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社  
住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174  
電話番号：03-5803-2151（代表）

【使用目的又は効果】

歯科高温鑄造用埋没材

\*\*【使用方法等】

本品は、歯科高温鑄造用埋没材「ヘラベストM」、「ヘラベスト オニキス クイック」、「ヘラベスト M プリント プラス」、「ヘラベスト サファイア クイック」の専用練和液です。通常、75%濃度が目安となりますが、症例に応じて蒸留水にて希釈調整しご使用ください。

製品名	ヘラベストM	ヘラベスト オニキス クイック	ヘラベストM プリント プラス	ヘラベスト サファイア クイック
混液比 (粉末：液体)	100:18 (g/ml)	100:22 (g/ml)	100:20 (g/ml)	100:22 (g/ml)
真空攪拌時間※	60秒	60秒	60秒	60秒
作業時間 (室温)	4分 (約22℃)	7分 (約22℃)	5分 (約23℃)	7分 (約22℃)

※高速回転の場合は40秒

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ①本品を使用する際、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ②加熱途中でファーンを閉めないこと。急速に燃焼する可能性がある。
- ③鑄造体を掘り出す前に十分吸水させ、粉塵を吸い込まないようにすること。掘出作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるために局所吸塵装置、または公的機関が認定した防塵マスク・防護シールド等を使用し、粉塵を吸い込まないように注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

本品又は練和物が皮膚に付着した場合は多量の流水で洗浄すること。また、目に入らないように注意すること。  
万一目に入った場合には、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・直射日光・高温・多湿を避け、25℃以下の暗所で保管すること。
- ・本品は凍結させないこと。(5℃以下で保管しないこと。)
- ・所定の鑄型強度、膨張量が得られなくなる場合がある。

[有効期間]

包装に記載の使用期限のとおり。

[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による]