

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料（70891000）
プロビールラボ

【形状・構造及び原理等】

形状：パテ

成分：ビニルポリシロキサン、その他

【使用目的又は効果】

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

*【使用方法等】

本品は義歯・模型等の概形印象を採得し、複模型用印象材またはシリコーンコア材として用います。

- 1) ベースとキャタリストの同量を、それぞれの計量スプーンを用いて採り、45 秒以内に練りムラのない様に均一に練和して下さい。
- 2) 模型や義歯などに圧接し、正確に印象を採得し、位置を固定し硬化させて下さい。
硬化時間：4 分 45 秒
室温 23℃、相対湿度 50±5%における値です。高温時は早く、低温時は遅くなります。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) フタ又はスプーン等をベースとキャタリスト間で取り間違えないこと。
- 2) ラテックス製手袋との接触を避けること。ラテックスの硫黄成分が付加型シリコーン印象材の硬化を阻害することがある。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本材を使用する際は、目や皮膚に付着しないように十分注意すること。
 - ②本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
 - ③目や長時間にわたる粘膜の接触事故の場合は、直ちに大量の流水で洗浄し、必要なら眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光・高温・多湿を避け、25℃以下の室温で保管すること。

【有効期間】

包装に記載の使用期限のとおり。

〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）