

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）
プレポール

【形状・構造及び原理等】

形状・構造	材質
	撚り糸

原理：研磨材料を回転させることにより、補綴物の研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用回転機器に完全に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に補綴物に押し付けて研磨します。

使用回転数(RPM)：3,000～5,000

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 製品は、シャンクを確実にチャックの奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。又、使用前に予備回転を行い、振れや異常等がないことを確認すること。
- 2) 破折や曲がりを起こす可能性があるため、無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。
- 3) 使用に伴い徐々に摩耗していくので、破損状態等を見極め、定期的に交換すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本材を使用する際には、眼の損傷を防ぐために保護めがねなどで防御すること。
 - ② 研磨作業はソフトタッチで行い、使用回転数を越えて使用しないこと。過度の加圧及び回転数で使用した場合には、発熱の原因につながり、作業中の破折により人体を傷つける恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・錆びている器具と一緒に保管しないこと。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツアー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）