

* 機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
ダイナミックス ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞
再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：プラスチック（イエロー）

原理：カートリッジ式印象材の先端に本品を取り付け
印象材を押し出すと、本品内部で印象材が練和
される。

【使用目的又は効果】

カートリッジ式歯科用印象材料を練和するための器具。

【使用方法等】

本品は自動練和器対応のダイナミックス カートリッジに
取り付け使用します。

1) カートリッジへの装着

- ① ダイナミックス カートリッジを片手で固定しながら、
もう片方の手でキャップのつまみをつかみ、90 度上
方に折り曲げます。その際、あまり力をかけないで下
さい。
- ② カートリッジからキャップを完全に取り外します(図
1)。
- ③ ベースとキャタリストが一緒に抽出されることを確
認し、抽出口を拭き取ってください。
- ④ ダイナミックス ミキシングチップを装着します(図
2)。装着がうまくいかない場合、本材の装着部(六角
形)とダイナミックス ミキシングチップの装着部(六
角形)の位置合わせが適切かどうかを確認して下さい。
- ⑤ ダイナミックス ミキシングチップを正しい位置に装
着したら、固定リングを止まる位置まで押し込み(図
3)、時計回りに 1/4 回転まわしてしっかりと固定して
下さい(図 4-6)。
- ⑥ 歯科用印象材混こう器を操作して練和します。

図 1



図 2

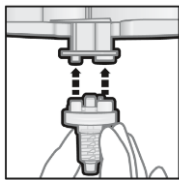


図 3

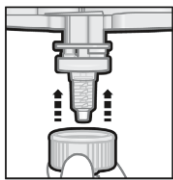


図 4

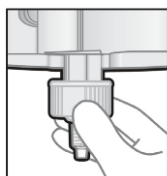


図 5


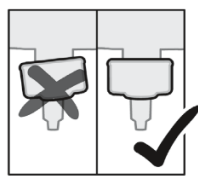


図 6

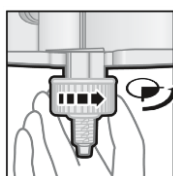

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用済みのダイナミックス ミキシングチップは、キャッ
プとしてカートリッジに装着しておき、次回使用前に取
り去って、新しいものを装着すること。次回使用時に固
定リングを取り外し、新しいダイナミックス ミキシング
チップに再度装着する。
- 2) ダイナミックス ミキシングチップ及び固定リングは、ダ
イナミックスカートリッジの印象材の抽出及び混合のみ
に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保
管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツァー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-1 7 4

電話番号：03-5803-2151（代表）