

歯科材料 6 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料（70891000）

## ヘラフォーム RS

### 【形状・構造及び原理等】

本品には、タイプA（ベース材、深緑色液体）、タイプB（硬化材、白色液体）がある。

主成分：シロキサン、シリカ

原理：ベース材と硬化材を混和することにより印象材が硬化する。

性能等：ショアー硬度 約 26

### 【使用目的又は効果】

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

### 【使用方法等】

本品は耐火模型等の複模型製作用のシリコン印象材です。

ミキシング比	1：1（タイプA：タイプB）
ミキシング時間	45秒（真空下）
硬化時間	約20分（室温）

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に液の分離が見られた場合には、適切な印象採得ができない恐れがあるため、分離した液は使用しないこと。

### 【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

本品は目を刺激するため、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診療を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本材は直射日光・多湿・火気を避け 25℃以下で保存すること。

[有効期間]

包装に記載の使用期限のとおり。

[記載の使用期限は自己認証（当社データ）による]

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツアー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）