

**機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器（70750010）
（歯科用ユーティリティーワックス）

パラジェット


【警告】

エアースリンダー操作中に誤って指を挟まないようにすること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) 全体図

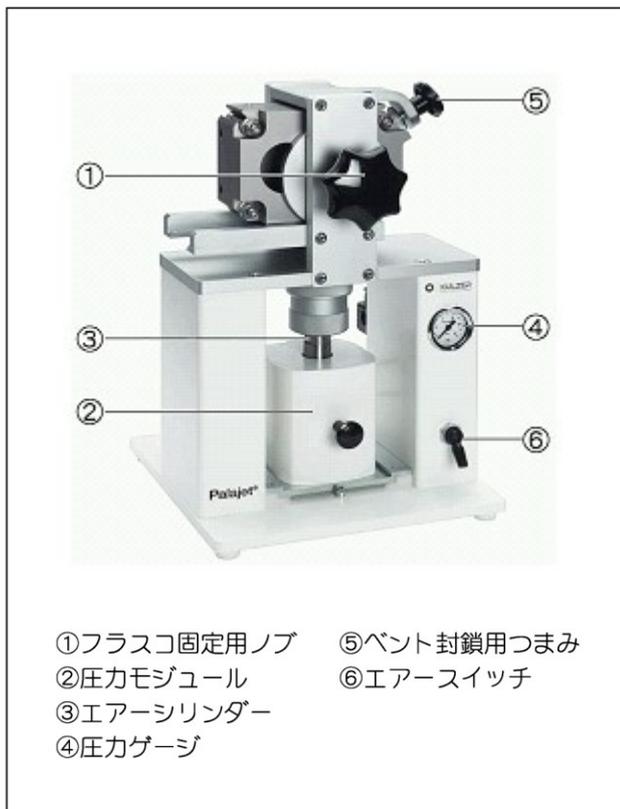

本機は以下の複数の一般的名称を含むセット品である。

販売名	一般的名称	JMDN コード
パラジェット	歯科技工用成型器	70750010
パラジェットスプ ルーワックス	歯科用ユーティリ ティーワックス	70896000

2. 機械外寸及び質量

高さ：約 400 mm
幅：約 290 mm
奥行き：約 265 mm
重量：約 13.5 kg

3. 原理

4 気圧で常温重合レジン及び加熱重合レジンをフラスコ内に精密注入する。

4. 性能等

動作圧力：4 気圧
コンプレッサー元圧：4～10 気圧（最大）
シリンダースピード：8～10 mm/秒
シリンダー最大負荷：約 2 気圧

【使用目的又は効果】

本機は常温重合レジン及び加熱重合レジン専用エア注入成型器です。

【使用方法等】

機器の詳細な使用方法については、ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読み下さい。

- 取り付け・設置（組み立て・据え付け）
機器の取り付け・設置は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行って下さい。
- 使用方法
デュオフラスコまたはシングルフラスコを固定した本体に、レジンを入れたシリンダーをセットし、レジンを注入し加圧する。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】
取扱説明書に従い、適切に保管・管理すること。
【耐用年数】（自主基準）
指定された保守点検を実施した場合、10 年

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い、日常の保守点検を励行すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社
住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174
電話番号：03-5803-2151（代表）

取扱説明書を必ずご参照下さい