

** 機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置（35761000）

ハイトパワー 3D

【警告】


<使用方法>

- ・本体内部に直接手を触れたり分解したりしないこと。[高压電流が流れており、感電する恐れがある。]
- ・ランプ交換用扉を開ける前には、機器の電源コードをプラグから抜くこと。[電気ショックを受ける恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

(1) 全体図

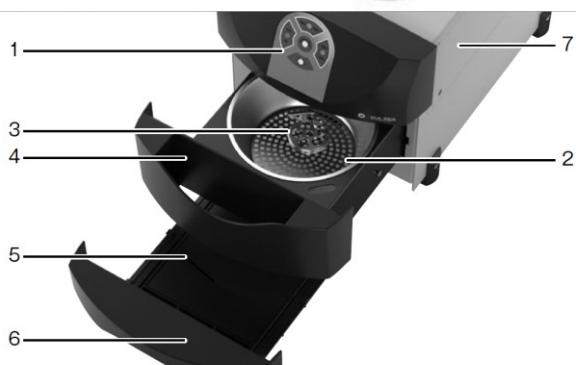

- ①コントロールパネル ②重合コンテナ ③クランプピン
④重合コンテナ扉 ⑤エアフィルター
⑥エアフィルターモジュール ⑦ランプ交換用扉(着脱式)

(2) コントロールパネル拡大図

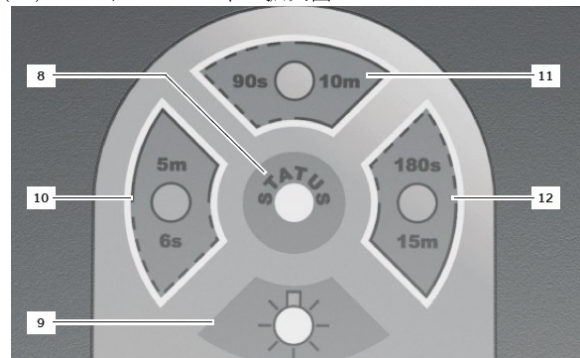

- ⑧電源コントロールLED ⑨ランプモニターLED
⑩照射スイッチ（6 秒/5 分）⑪照射スイッチ（90 秒/10 分）
⑫照射スイッチ（180 秒/15 分）

2. 器械外寸

- 高さ : 約 225 mm
幅 : 約 220 mm
奥行き : 約 330 mm

3. 原理

本品は、キセノンフラッシュランプで光を発生させ光触媒型レ진을重合硬化させる。

4. 性能等

メインスペクトル：390～540 nm

【使用目的又は効果】

歯科技工用重合装置

【使用方法等】

1. 取り付け・設置

- 1) 機器の取り付け・設置は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行って下さい。
- 2) 背面パネルは壁面から 10cm 以上離し、冷却ファンの通気性を確保すること。
- 3) 装置底面からの排気を妨げないように、通気性を保って設置すること。

2. 使用方法

補綴物を重合コンテナ中央部に入れ、光重合を行う。
機器の詳細な操作方法については、付属の取扱説明書をご使用前に必ずお読みになり、その方法に従ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 連続照射の際、本体が高温になるためやけどに注意すること。
- 2) ランプが熱い状態でランプ交換をしないこと。メインスイッチを ON にしたまま 30 分程度放熱し、熱が冷めてから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

取扱説明書に従い、適切に保管・管理すること。

〔耐用年数〕（自主基準）

指定された保守点検を実施した場合、10 年。

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）

取扱説明書を必ずご参照下さい。