

機械器具 6 0 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット (34713000)

インディ スキャン 2. 0

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

スキャン方法	重量	奥行き×幅×高さ
2カメラ2軸	13kg	395×400×275mm

外観



本体内部の構造

- ・プロジェクター
- ・カメラ

2. 原理

ストラクチャライト方式：

プロジェクターより歯科模型に光を照射し、そのパターン画像をデジタルカメラで読み取り、専用ソフトウェアで三次元の計測データとして処理し、デジタル模型としてモニターに表示・再現する。

【使用目的又は効果】

本器は複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)に用いる。

【使用方法等】

1. 取り付け・設置（組み立て・据え付け）

- ① 本装置の取り付け・設置は、弊社又は弊社指定の業者が行ってください。
- ② 装置の詳細な取り付け・設置方法は付属の取扱説明書に従ってください。

2. 使用方法

- ① お手持ちの PC の電源を入れ専用ソフトウェアを起動します。
- ② スキャナの電源を ON にします。スキャナが起動するまで約 10 秒かかります。
- ③ プレートに測定する歯科模型を固定し、スキャナのテーブルにセットします。
- ④ 歯科模型をスキャンした後、PC 上の専用ソフトウェアで歯科修復物の設計をします。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

詳細については、付属の取扱説明書を必ず読むこと。

- ① USB WiFi アダプターを使用せず、安定した通信環境（インターネット）を確保すること。
- ② お手持ちの PC には、所定のソフトウェア以外のものをインストールしないこと。
- ③ 純正部品及び付属品以外の部品等を使用しないこと。
- ④ 1 週間に一度はスキャナの校正を行うこと。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 照射光を直視しないよう注意すること。
- ② ネットワークに接続した環境で使用する際は、コンピュータウィルス及び情報の漏洩等に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

直射日光があたる場所には設置しないこと。

2. 使用耐用年数（自主基準）

指定された保守点検を実施した場合、5 年。

【保守・点検に係る事項】

- ① 保守作業を行う場合、あるいはクリーニング作業を行う場合には必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いて行うこと。
- ② 本体内部に水分や液体などが侵入すると故障や漏電の原因となるので注意すること。
- ③ 本装置の内部を開けるのは、弊社あるいは弊社指定の業者に任せること。装置内部にはユーザーが保守する必要のある部品はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）